

CuringPen

MANUEL D'UTILISATION Lumière de polymérisation dentaire

Changzhou Sifary Medical Technology Co.,Ltd.

Version : 04 IFU-6535001

Délivré : 2022.09.03 Taille:210mm×90mm


Content

1. Portée du CuringPen4
1.1 Identification des pièces4
1.2 Composants et accessoires5
1.3 Accessoires en option5
2. Symboles utilisés6
3. Avant l'utilisation7
3.1 Champ d'application7
3.2 Contre-indications7
4. Mise en place du CuringPen8
4.1 Installer la tête de la source lumineuse 8
4.2 Installer le manchon jetable8
4.3 Installer l'écran de protection de la lumière8
4.4 Recharge9
5. Interface d'utilisation10
5.1 Touche du panneau10
6. Réglage11
6.1 Sélection du mode mémoire11
6.2 Paramètres avancés11
7. Opération13
7.1 Recharge13
7.2 Fonctionnement de la pièce à main 14
7.3 Mode de fonctionnement16
8. Maintenance18
9. Avertissement d'erreur19
10. Dépannage20
11. Données techniques21
12. Tables EMC22
13. Déclaration

1. Portée du CuringPen

1.1 Identification des pièces


- 3 Tête de la source lumineuse
- 2 Bouclier de protection contre la lumière
- 3 Manchon jetable
- 4 Pièce à main
- 5 Adaptateur
- 6 Base de chargement

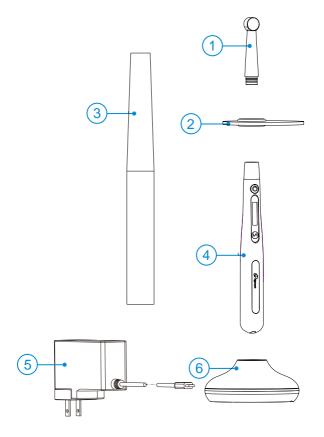

1.2 Composants et accessoires

Pièce à main (1pcs)	Tête de la source lumineuse (1pcs)
Manchon jetable (100pcs)	Adaptateur (1pcs)
Base de chargement (1pcs)	Bouclier de protection contre la lumière (1pcs)

1.3 Accessoires en option

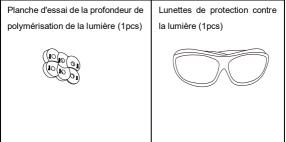

2. Symboles utilisés

Warning	Si les instructions ne sont pas suivies correctement, le fonctionnement peut entraîner des risques pour le produit ou l'utilisateur/patient.		
⚠ NOTE	Informations complémentaires, explication du fonctionnement et des performances.		
SN	Numéro de série		
REF	Numéro de catalogue		
***	Fabricant		
	Date de fabrication		
	Équipement de classe II		
ⅉ	Partie appliquée de type B		
===	Courant continu		
	Éliminer conformément à la directive WEEE.		
\Rightarrow	Garder au sec		
2	Ne pas réutiliser		
	Consultez le mode d'emploi		
EC REP	Représentant autorisé dans la Communauté européenne		
-20°C	Limitation de la température		
20%	Limitation de l'humidité		
70kPa 106kPa	Limitation de la pression atmosphérique		
Eighteeth	LOGO du fabricant		
(€	Marquage CE		
LOT	Numéro de lot		
MD	Dispositif médical		

3. Avant l'utilisation

3.1 Champ d'application

Le CuringPen est destiné à polymériser les résines et composites dentaires.

Cet appareil ne doit être utilisé qu'en milieu hospitalier, dans des cliniques ou des cabinets dentaires par du personnel dentaire qualifié et ne doit pas être utilisé dans un environnement riche en oxygène.

3.2 Contre-indications

Ne pas utiliser l'appareil pour une procédure non dentaire.

La sécurité et l'efficacité n'ont pas été établies chez les femmes enceintes et les enfants.



Lisez les avertissements suivants avant l'utilisation :

- L'appareil ne doit pas être placé dans un environnement humide ou dans un endroit où il peut entrer en contact avec tout type de liquide.
- N'exposez pas l'appareil à des sources de chaleur directes ou indirectes.
 L'appareil doit être utilisé et stocké dans un environnement sûr.
- 3. L'appareil nécessite des précautions particulières en matière de compatibilité électromagnétique (CEM) et doit être installé et utilisé dans le strict respect des informations relatives à la CEM. En particulier, n'utilisez pas l'appareil à proximité de lampes fluorescentes, d'émetteurs radio, de télécommandes, de dispositifs de communication RF portables ou mobiles et n'utilisez pas ce système à proximité de l'équipement chirurgical HF actif de l'hôpital. Ne pas charger, faire fonctionner ou stocker à des températures élevées. Respectez les conditions de fonctionnement et de stockage spécifiées.
- Une protection contre la lumière et un manchon jetable sont obligatoires pendant le traitement.
- Si des irrégularités apparaissent dans l'appareil pendant le traitement, éteignez-le. Contactez l'agence.
- Aucune modification de cet appareil n'est autorisée. Ne jamais ouvrir ou réparer l'appareil soi-même, sous peine d'annuler la garantie.

4. Mise en place du CuringPen

4.1 Installer la tête de la source lumineuse

S'assurer que la tête de la source lumineuse est alignée avec les fentes de la pièce à main. Pousser doucement jusqu'à ce qu'un "clic" se fasse entendre, indiquant que la tête de la source lumineuse est bien installée dans la pièce à main.



La tête de la source lumineuse peut être tournée à 360 degrés sans être retirée, ce qui permet de regarder facilement l'écran LCD pendant le traitement.




Warning

- Seule la tête de source lumineuse d'origine peut être utilisée. Vérifier la tête de la source lumineuse et la pièce à main avant l'installation. Ne pas utiliser une tête de source lumineuse et une pièce à main endommagées.
- Après avoir installé la tête de la source lumineuse, tirez-la doucement pour vous assurer que la connexion est bonne, sinon elle peut provoquer un défaut inattendu, voire blesser les patients.

4.2 Installer le manchon jetable

Appliquer un manchon jetable sur la totalité de la tête de la source lumineuse et de la pièce à main avant de commencer une procédure

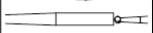

4.3 Installer l'écran de protection de la lumière

Assurez-vous que la tête de la source lumineuse est alignée avec les fentes du bouclier lumineux de protection, puis branchez-les ensemble.





Warning

- Les manchons jetables doivent être jetés après chaque utilisation.
- La tête de la source lumineuse, la protection contre la lumière et la pièce à main doivent être nettoyées et désinfectées après chaque traitement.

Évitez l'exposition directe de la lampe aux yeux pendant le travail.

4.4 Recharge

Branchez l'adaptateur USB dans la base de charge et branchez l'autre extrémité dans une prise de courant. Le voyant d'alimentation de la base de charge s'allume (vert).





NOTE

 Seul l'adaptateur original peut être utilisé. Placez la pièce à main à fond dans la base de charge, l'état de charge s'affiche à l'écran.



L'indication de charge apparaît à l'écran et clignote lentement pendant la charge. Lorsque la batterie est complètement chargée ou presque, le flash s'arrête.




NOTE

 Placez la pièce à main dans la base de charge dans le bon sens, sinon la pièce à main ne sera pas rechargée.

5. Interface d'utilisation

5.1 Touche du panneau

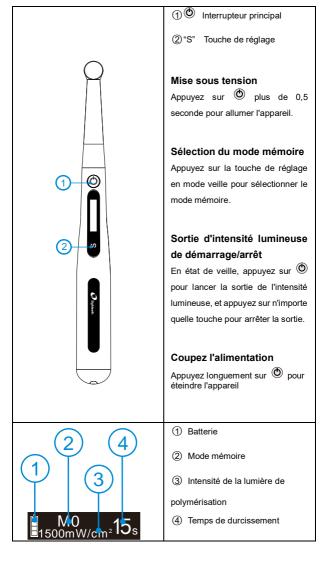

6. Réglage

6.1 Sélection du mode mémoire				
	Changement de mode de mémoire Il existe 6 programmes de mémoire intégrés, à			
$\mathbf{\hat{l}_{1500mW/cm^2}15_s}$	savoir M0, M1, M2, RAMP, PULSE, Detect.			
■1500mw/cm-103	Appuyez sur la touche de réglage pour modifier la			
	mémoire pendant l'état de veille.			
	Réglage de l'intensité lumineuse Les modes mémoire de M0, M1 et M2 peuvent être personnalisés à 2300mW/cm2, 1500mW/cm2 ou			
	1000mW/cm2. Appuyez longuement sur "S" pour			
	entrer dans le menu de réglage de l'intensité			
	lumineuse, puis appuyez sur "S" pour modifier ou			
	appuyez sur l'interrupteur principal pour confirmer et quitter.			
Curing Power 1500nW/cm ²	Dans le menu de réglage de l'intensité lumineuse,			
	appuyez longuement sur "S" pour accéder au			
	menu de réglage du temps de polymérisation.			
	NOTE L'intensité lumineuse des modes mémoire RAMPE, IMPULSION et Détection est intégrée, et l'utilisateur ne peut pas modifier les paramètres.			
	Réglage du temps de durcissement			
	Dans le menu de réglage du temps de polymérisation, appuyez sur "S" pour sélectionner différents temps. La sélection du temps est différente selon l'intensité lumineuse :			
	polymérisation, appuyez sur "S" pour sélectionner différents temps. La sélection du temps est différente selon l'intensité lumineuse :			
Curing Time	polymérisation, appuyez sur "S" pour sélectionner différents temps. La sélection du temps est différente selon l'intensité lumineuse : intensité lumineuse (sélection du temps (mW/cm²) sélection du temps (sec)			
Curing Time 185	polymérisation, appuyez sur "S" pour sélectionner différents temps. La sélection du temps est différente selon l'intensité lumineuse : intensité lumineuse (sec) 2300 01,02,03			
	polymérisation, appuyez sur "S" pour sélectionner différents temps. La sélection du temps est différente selon l'intensité lumineuse : intensité lumineuse (mW/cm²) sélection du temps (sec) 2300 01,02,03 1500 05,10,15,20			
	polymérisation, appuyez sur "S" pour sélectionner différents temps. La sélection du temps est différente selon l'intensité lumineuse : intensité lumineuse sélection du temps (sec) 2300 01,02,03 1500 05,10,15,20			
	polymérisation, appuyez sur "S" pour sélectionner différents temps. La sélection du temps est différente selon l'intensité lumineuse : intensité lumineuse (mW/cm²) sélection du temps (sec) 2300 01,02,03 1500 05,10,15,20 1000 05,10,15,20			

6.2 Paramètres avancés



Lorsque l'appareil est éteint, maintenez la touche "S" enfoncée, puis appuyez sur o pour accéder au réglage "Auto Off". Il peut être réglé sur 1min, 5min, 10min ou 15min.

réglage. Le mode mémoire actuel enregistre automatiquement les paramètres de réglage.

	Appuyez sur pour modifier le réglage, appuyez sur "S" pour entrer dans le mode de réglage suivant - "Volume".
Volume mid	Dans le menu de réglage du volume, appuyez sur "S" pour sélectionner différents réglages. Il peut être réglé sur "Off", "low", "mid" ou "high". Appuyez sur pour modifier le réglage du volume, appuyez sur "S" pour accéder au mode de réglage suivant - "Main".
Hand Right	La main droite et la main gauche peuvent être réglées dans le menu de réglage "Hand". Appuyez sur (b) pour modifier le réglage, appuyez sur "S" pour passer au réglage suivant.
L1	Le dernier élément est la version du micrologiciel, et la pièce à main s'éteint automatiquement dans les 30s qui suivent l'affichage des informations sur la version.

7. Opération

7.1 Recharge



Affiche la quantité restante actuelle de la batterie.

S'il reste moins de 15%, veuillez charger.



NOTE

 Si la puissance est inférieure à 15 %, l'appareil doit être rechargé dans les 30 jours, sinon la batterie sera irrémédiablement endommagée.

Pendant la charge, l'indication de charge apparaît sur l'écran et clignote lentement. Lorsque la batterie est complètement chargée ou dans un état proche de la charge complète, le flash s'arrête.

Il faut environ 4 heures pour une charge complète, selon la puissance résiduelle de la batterie et son état.

Elle peut être rechargée 300 à 500 fois, en fonction des conditions d'utilisation de l'appareil.





NOTE


- Pendant la charge, les autres fonctions s'arrêtent de force. Lorsqu'il est retiré de la base de chargement, appuyez sur l'interrupteur principal, la dernière fonction sera rappelée.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le recharger au moins une fois par mois.
- Seul l'adaptateur original peut être utilisé.



Warning

 Ne changez pas la batterie, seul un technicien ou un distributeur qualifié peut changer la batterie, les composants électroniques seront endommagés si vous utilisez une mauvaise batterie ou si vous l'installez d'une mauvaise manière.

7.2 Fonctionnement de la pièce à main

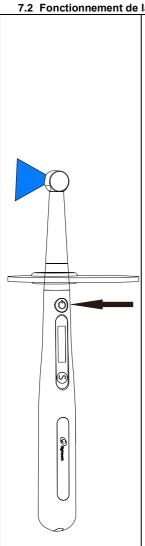

Allumez l'appareil et sélectionnez un mode. Appuyez sur démarrer la sortie d'intensité lumineuse, et le temps commencera à décompter. Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter la sortie pendant la sortie de l'intensité lumineuse.

Il y a un bip toutes les 5s pendant le fonctionnement, et la sortie s'éteint automatiquement à la fin du compte à rebours.



- Lorsque l'appareil fonctionne, n'éclairez pas directement les yeux, sinon risquez de vous vous blesser.
- La température maximale de surface de la source lumineuse peut atteindre 55 °C ou plus pendant l'utilisation, n'éclairez pas directement la peau, sinon des brûlures à haute température peuvent se produire.



NOTE

- Pour éviter la surchauffe de la lampe, après avoir utilisé l'appareil en continu 10 fois 2300mW/cm2. il sera interdit d'utiliser la sortie d'intensité lumineuse la plus élevée dans un délai d'une minute.
- Lors de l'utilisation. la lumière doit être directement irradiée sur les résines dentaires et les composites

en cours de polymérisation afin d'éviter une mauvaise exposition. • Le manchon jetable et la protection contre la lumière sont fortement recommandés.
Lorsque l'appareil est en mode veille, il s'éteint automatiquement lorsqu'il atteint le temps d'arrêt automatique défini. Le réglage d'usine par défaut est de 5 minutes.



Warning

- Avant de l'utiliser, veuillez l'essayer en dehors de la cavité buccale pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème avec le fonctionnement de l'appareil.
- Ne démontez pas la tête de la source lumineuse pendant le traitement.




NOTE

- En cas de fonctionnement anormal, cessez d'utiliser l'appareil et signalez-le à l'entreprise.
- Les gants sont obligatoires pendant le traitement.
- Nettoyez toujours la pièce à main et la tête de la source lumineuse après chaque traitement.

7.3 Mode de fonctio	Mode standard			
M0、M1、M2	Dans ces trois modes, l'intensité lumineuse peut être réglée sur 2300mW/cm², 1500mW/cm² ou 1000mW/cm². Wavelength: 380nm-515nm Lorsque l'on appuie sur la touche (b) l'intensité lumineuse réglée est immédiatement émise, et un signal sonore retentit toutes les 5 secondes.			
	Mode RAMP			
RAMP	ntensité lumineuse : 1000mW/cm² . Longueur d'onde : 380nm-515nm Lorsqu'on appuie sur intensité lumineuse augmente progressivement jusqu'à 1000mW/cm2 au cours des 5 premières secondes, puis continue à émettre 1000mW/cm2. Un signal sonore est émis toutes les 5 secondes.			
	Mode PULSE			
PULSE	Intensité lumineuse : 1000mW/cm² Longueur d'onde : 380nm-515nm Lorsque vous appuyez sur			
Detect	Mode Detect Intensité lumineuse : 600mW/cm²			

Longueur d'onde : 380nm-515nm

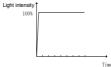

Lorsque l'on appuie sur U'intensité lumineuse réglée est immédiatement émise, et un signal sonore retentit toutes les 5 secondes.



NOTE

 Ce mode est uniquement adapté à la détection du tartre, des caries, des fissures, etc.



Warning

 Le Mode Détection ne peut pas être utilisé pour polymériser les résines dentaires et les composites, sinon il y a un risque de polymérisation incomplète.

8. Maintenance

Composants de désinfection Pièce à main Tête de la source lumineuse Base de chargement Bouclier de protection contre la lumière

Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon légèrement humidifié avec de l'éthanol pour la désinfection (éthanol 70 à 80vol%) pendant au moins 2min, répétez 5 fois.



Warning

- N'utilisez rien d'autre que de l'éthanol pour la désinfection (éthanol 70 à 80 % vol.).
- N'utilisez pas trop d'éthanol car il va entrer dans la machine et endommager les composants à l'intérieur.

Composants jetables Manchon jetable (100pcs)



Warning

 Veuillez jeter le manchon jetable après chaque utilisation et ne pas le réutiliser.

9. Avertissement d'erreur

Low Battery	La batterie est trop faible. Rechargez- la immédiatement.
Fault: Blue Error	La LED bleue est cassée. Contactez votre distributeur.
Fault: Blue Overload	La LED bleue est surchargée. Contactez votre distributeur.
Fault: Violet Error	La LED violette est cassée. Contactez votre distributeur.
Fault: Violet Overload	La LED violette est surchargée. Contactez votre distributeur.
<u> </u>	La température de la tête de la source lumineuse est plus élevée que prévu. Mettez l'appareil hors tension ou attendez plus d'une minute pour le laisser refroidir.

10. Dépannage

En cas de problème, vérifiez les points suivants avant de contacter votre distributeur. Si aucun de ces points n'est applicable ou si le problème n'est pas résolu même après avoir pris des mesures, le produit peut être défectueux. Contactez votre distributeur.

Problème	Cause	Solution	Ref ch ap
	La batterie n'est plus alimentée.	Chargez la batterie.	7.1
L'alimentation n'est pas sous tension.	Le temps nécessaire pour appuyer sur l'interrupteur principal est trop court.	Appuyez sur l'interrupteur principal pendant plus de 0,5 seconde.	5.1
Le voyant	Utilisation d'un mauvais adaptateur.	Utilisez l'adaptateur original.	/
d'alimentation ne s'allume pas pendant la	Il n'y a pas d'électricité dans la prise.	Vérifiez la connexion.	1
charge.	L'adaptateur n'est pas connecté.	Vérifiez la connexion.	/
La pièce à main	La pièce à main dans la base de chargement est dans le mauvais sens.	Vérifiez la connexion.	4.4
n'affiche pas	La base de chargement est	Using adapter connect to handpiece directly, and	1
charge pendant la	cassée.	contact your distributor.	
charge.	La broche de charge de la base de charge est incapable de rebondir.	Enlevez les débris qui se trouvent entre la partie mobile et la base de la tige de charge.	1
Aucune sortie	La pièce à main est cassée.	Contactez votre distributeur	/
Pas de son	Le volume du signal sonore est désactivé.	Réglez le volume du bip sur faible, moyen ou élevé.	1
	La pièce à main est cassée	Contactez votre distributeur	
Intensité Iumineuse insuffisante	Il y a de la résine ou d'autres contaminants sur la surface de la lentille de la lampe.	Nettoyez les résidus de la tête de lampe	

11. Données techniques

Fabricant	Changzhou Sifary Medical Technology Co.,Ltd	
Modèle	CuringPen	
Dimensions	22cm x 11cmx 8cm±1cm	
Poids	730g ±10%	
Alimentation électrique	Batterie au lithium-ion : 3.7V, 1600mAh, ±10%	
Alimentation du chargeur	AC 100-240 V, ±10%	
Puissance de sortie du chargeur	5V 1A	
Fréquence d'alimentation	50/60Hz, ±10%	
Puissance nominale du chargeur	5VA	
Intensité lumineuse	2300mW/cm² 1500mW/cm² 1000mW/cm² 600 mW/cm²	
Longueur d'onde	380nm-515nm	
Classe de sécurité électrique	Classe II	
Partie appliquée	В	
Mode de fonctionnement	Fonctionnement intermittent 15mins. ON / 1min. OFF	
Conditions de fonctionnement	Utilisation: dans des espaces fermés Température ambiante: 5°C ~ 40 °C Humidité relative: <80% Altitude de fonctionnement: < 3000m au-dessus du niveau de la mer Pression atmosphérique: 70kPa ~ 106kPa	
Conditions de transport et de stockage	Température ambiante : -20 °C ~ +55 °C Humidité relative : 20% ~ 80 Pression atmosphérique : 70kPa ~ 106kPa	

12. Tables EMC

Guide et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques

Le **CuringPen** est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du **CuringPen** doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Test d'émissions	Conformité	Guide de l'environnement électromagnétique	
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	Le CuringPen utilise l'énergie RF uniquement pour sa fonction interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer des interférences dans les équipements électroniques situés à proximité.	
Émissions RF CISPR 11	Classe B	Le CuringPen peut être utilisé dans tous les établissements, y	
Émissions d'harmoniques IEC61000-3-2	Classe A	compris les établissements domestiques et ceux directement raccordés au	
Fluctuations de tension/émissions de scintillement CEI 61000-3-3	Conforme	réseau public d'alimentation électrique basse tension qui alimente les bâtiments à usage domestique.	

Guide et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique

Le CuringPen est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du CuringPen doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Test	Niveau de test	Niveau de	Environnement
d'immunité	IEC 60601	conformité	électromagnétique
			- conseils
Décharge	+/- 8 kV contact	+/- 8 kV contact	Les sols doivent être
électrostatique			en bois, en béton ou
(ESD) IEC	+/- 2 kV, +/- 4	+/- 2 kV, +/- 4	en carreaux de
61000-4-2	kV, +/- 8 kV, +/-	kV, +/- 8 kV, +/-	céramique. Si les
	15 kV air	15 kV air	sols sont recouverts
			d'un matériau
			synthétique,
			l'humidité relative
			doit être d'au moins
			30 %.

<u> </u>	I			
Electricité rapide	±2kV	±2kV	La qualité de	
Transitoires	Fréquence de	Fréquence de	l'alimentation	
/éclatements	répétition de	répétition de	secteur doit être	
CEI 61000-4-4	100kHz	100 kHz	celle d'un	
			environnement	
			commercial ou	
			hospitalier typique.	
Surtension	Ligne à ligne :	Ligne à ligne :	La qualité de	
IEC 61000-4-5	±0,5kV, ±1kV	±0,5kV, ±1kV	l'alimentation	
IEC 61000-4-5	±0,5kV, ±1kV	±0,5KV, ±1KV		
			secteur doit être	
	Ligne à la terre :	Ligne à la terre :	celle d'un	
	±0,5kV, ±1kV,	±0,5kV, ±1kV,	environnement	
	±2kV	±2kV	commercial ou	
			hospitalier typique.	
Creux de	0% U _⊤ ;0.5 cycle	0% U _T ; 0.5	La qualité de	
tension, courtes	à 0°, 45°, 90°,	cycle	l'alimentation	
interruptions et	135°,180°,225°,	à 0°, 45°, 90°,	secteur doit être	
variations de	270°, et 315°	135°, 180°,	celle d'un	
tension sur les		225°, 270°, et	environnement	
lignes	0% U _T ; 1 cycle	315°	commercial ou	
d'alimentation	et 70% U _T ;	313		
		00/ 11 41	, ,, ,	
électrique	25/30 cycles	0% U _T ; 1 cycle	Si l'utilisateur des	
CEI 61000-4-11	Phase	et 70% U _⊤ ;	appareils doit	
	sinusoïdale à 0°	25/30 cycles	continuer à	
	0% U _T ; 250/300	Phase	fonctionner pendant	
	cycle	sinusoïdale à 0°	les interruptions du	
		0% U _T ; 250/300	réseau électrique, il	
		cycle	est recommandé	
			d'alimenter les	
			appareils à partir	
			d'un système	
			d'alimentation sans	
			•	
			batterie	
Fréquence de	30 A/m	30 A/m	Le champ	
puissance	50Hz ou 60Hz	50Hz ou 60Hz	magnétique à haute	
champ			fréquence doit être à	
magnétique			des niveaux	
IEC 61000-4-8			caractéristiques d'un	
			emplacement	
			typique dans un	
			environnement	
			commercial ou	
Note II to a 1	(-)	05/00	hospitalier typique.	
Note: U _T : tension(s) nominale(s); par exemple, 25/30 cycles signifie 25 cycles à				
50 Hz ou 30 cycles à 60 Hz.				

Guide et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique

Le **CuringPen** est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du **CuringPen** doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

utilise dans un tel e	AIVII OIIIIGIIIGIIL.			
Test	Test Niveau de test Niveau de		Environnement	
d'immunité	IEC 60601	conformité	électromagnéti 	
			que - conseils	
Perturbations	3 V	3 V	Les équipements	
conduites	0,15 MHz - 80		de	
induites par des	MHz, 6 V dans		communication	
champs RF	les bandes ISM		RF portables et	
CEI 61000-4-6	entre 0,15 MHz		mobiles ne	
	et 80 MHz, 80 %		doivent pas être	
	AM à 1 kHz		utilisés à une	
			distance	
			inférieure à la	
			distance de	
			séparation	
			recommandée	
		3V/m	calculée à partir	
Champs	3 V/m, 80 MHz -	34/111	de l'équation	
électromagnétiq	2,7 GHz, 80 %		applicable à la	
ues RF rayonnés	AM à 1 kHz		fréquence de	
CEI 61000-4-3			l'émetteur.	
			Distances de	
Champs de	Voir le tableau	Conforme	séparation	
proximité des	des		minimales	
équipements de	équipements de		recommandées	
communication	communication		Voir le tableau	
	sans fil RF dans		des équipements	
	"Distances de		de	
CE161000-4-3	séparation		communication	
	minimales		sans fil RF dans	
	recommandées"		"Distances de	
			séparation	
			minimales	
			recommandées".	
communication sans fil RF CEI 61000-4-3	sans fil RF dans "Distances de séparation minimales		des équipements de communication sans fil RF dans "Distances de séparation minimales	

Distances de séparation minimales recommandées

De nos jours, de nombreux équipements sans fil RF sont utilisés dans divers lieux de soins de santé où des équipements et/ou des systèmes médicaux sont utilisés. Lorsqu'ils sont utilisés à proximité d'équipements et/ou de systèmes médicaux, la sécurité de base et les performances essentielles de ces derniers

peuvent être affectées. Le **CuringPen** a été testé avec le niveau de test d'immunité du tableau ci-dessous et répond aux exigences correspondantes de la norme IEC 60601-1-2:2014. Le client et/ou l'utilisateur doit veiller à maintenir une distance minimale entre les équipements de communication sans fil RF et le **CuringPen**, comme recommandé ci-dessous.

	,					
Fréquen ce des	Bande			Puissanc e	Distan	Niveau de test
tests	(MHz)	Service	Modulation	maximale	ce	d'immuni
(MHz)	(IVII IZ)			(W)	(m)	té (V/m)
(IVII IZ)			Modulation	(**)		te (v/III)
385	380-	TETRA	d'impulsions	1.8	0.3	27
303	390	400	18Hz	1.0	0.3	21
			FM			
		GMRS	Déviation de			
450	430- 470	460	± 5 kHz	2	0.3	28
450		FRS 460	1 kHz			
		FR3 400	sinusoïdal			
710			Modulation			
710	704-	LTE Band	l		0.3	9
	787	13, 17	d'impulsions 217Hz	0.2	0.3	9
780			217HZ			
810		GSM				
870		800/900,				
		TETRA				
	800-	800, iDEN	Modulation			
	960		d'impulsions	2	0.3	28
930	960	820, CDMA	18Hz			
		1				
		850, LTE Band				
		5				
1720		GSM				
1845	1	1800;				
	1700- 1990	CDMA				
		1900;				
		GSM	Modulation			
		1900;	d'impulsions	2	0.3	28
1970		DECT;	217Hz			
		LTE Band				
		1, 3,				
		4, 25;				
		UMTS				
		Bluetooth				
	2400- 2570	,				
		WLAN,				
2450		802.11	Modulation			
		b/g/n,	d'impulsions	2	0.3	28
		RFID	217Hz			
		2450,				
		LTE Band				
		7				
	5100-	WLAN	Modulation			
5240	5800	802.11	d'impulsions	0.2	0.3	9
		a/n	217Hz			
5500						
5785						



1. L'utilisation d'accessoires et de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant du CuringPen peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique du CuringPen et provoquer un mauvais fonctionnement.

Informations sur le cable :

Nom du câble	Longueur du câble (m)	Blindé ou non	Remarque
Câble adaptateur	1.2	Non	1

2. Il convient d'éviter d'utiliser le CuringPen à côté d'un autre équipement ou de l'empiler avec celui-ci, car cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement. Si une telle utilisation est nécessaire, le fonctionnement normal du CuringPen et des autres équipements doit être vérifié.

13. Déclaration

Durée de vie

La durée de vie des produits de la série CuringPen est de 3 ans.

Maintenance

Le FABRICANT fournira des schémas de circuit, des listes de pièces détachées, des descriptions et des instructions d'étalonnage pour aider le PERSONNEL DE SERVICE à réparer les pièces.

Traitement

L'emballage doit être recyclé. Les parties métalliques de l'appareil sont éliminées comme ferraille. Les matériaux synthétiques, les composants électriques et les cartes de circuits imprimés sont éliminés comme déchets électriques. Les piles au lithium sont éliminées comme des déchets spéciaux. Veuillez les traiter conformément aux lois et réglementations locales en matière de protection de l'environnement.

Droits

Tous les droits de modification du produit sont réservés au fabricant sans autre avis. Les photos ne sont données qu'à titre indicatif. Les droits d'interprétation finale appartiennent à CHANGZHOU SIFARY MEDICAL TECHNOLOGY CO, LTD. Le design industriel, la structure interne, etc, ont été revendiqués pour plusieurs brevets par SIFARY, toute copie ou produit contrefait doit prendre des responsabilités légales.



Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd.

Add: NO.99, Qingyang Road, Xuejia County, Xinbei District,

Changzhou City, 213000 Jiangsu, P.R. China

Tel: +86-0519-85962691 Fax: +86-0519-85962691 Email: Info@sifary.com Web: www.sifary.com



Caretechion GmbH Tel: +49 211 2398 900

Add: Niederrheinstr. 71, 40474 Dusseldorf, Germany

Email: info@caretechion.de

Tous droits réservés.